


Logre una compresión adecuada con el sistema ACCUTAB.

ACCUTAB le permite quitarse y volver a ponerse la prenda según las órdenes del médico, de acuerdo con su programa de uso. Los niveles de presión en el sistema ACCUTAB son fáciles de ver y ajustar.

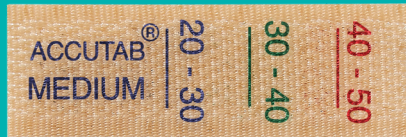

Identifique rápidamente el rango de presión correcto



Fácil de aplicar y ajustar

Aplicación y retirada de la prenda de compresión COMPRECARES

1. Protector:

Póngase el protector como si fuera un calcetín, sin fruncirlo ni enrollarlo. (Figura 1)



Figura 1

2. Prenda:

Póngase la prenda sobre el protector justo debajo de la rodilla. El panel negro debe estar en la parte delantera y la etiqueta en la parte trasera, en la parte superior de la prenda. (Figura 2)

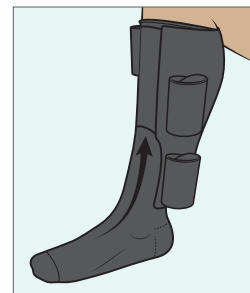


Figura 2

Jale de las tiras por la parte delantera de la pierna. Cierre las tiras sin estirar ni aplicar presión. Evite dejar espacios entre ellas o superponerlas. Presione los extremos de enganche de la tira levemente hacia afuera de la prenda a fin de fijarla. (Figura 3)

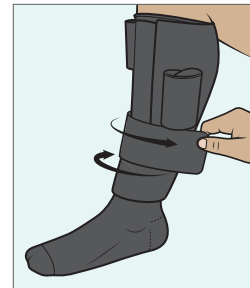


Figura 3

3. Ubicación del sistema ACCUTAB:

Coloque una lengüeta ACCUTAB en el extremo de cada tira. La lengüeta ACCUTAB debe estar paralela a la tira, con las palabras más cerca del extremo de la tira. Luego jale de la tira hasta la línea del nivel de presión que su médico le recetó. Estas lengüetas pueden permanecer en su lugar cuando se usa la prenda y emplearse como guía cuando se la vuelva a poner.* (Figura 4)

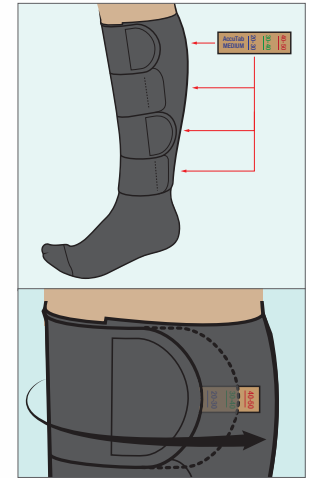


Figura 4

*NOTA: Si el tamaño de su pantorrilla cambia, vuelva a repetir los pasos de aplicación.

4. Retirada de la prenda:

Doble cada tira sobre sí misma para crear un lazo. Luego deslice la prenda hacia abajo y fuera de la pierna. Ahora quítese el calcetín protector. (Figura 5)



Figura 5



Instrucciones de lavado:

- » Si es posible, lave el protector y la prenda en una bolsa de lavandería tipo malla
 - » Seque a baja temperatura/sin calor o al aire libre (se recomienda el secado al aire para prolongar la vida útil de la prenda)
 - » NO use lejía ni suavizantes de ropa
 - » Lave los protectores después de cada uso**
- **La prenda debe quitarse una vez al día para permitir que la piel respire y para el cuidado de la herida. Vuelva a ponérsela según los pasos 1-3. Consulte las instrucciones de su médico.