



**Instructions
for Use**
Mode d'emploi
Instrucciones
de uso

Anti-Embolism Elastic Stockings

Le bas élastique antiembolie

Las medias elásticas anti-embolia

Patient Information | Information concernant le patient | Información del paciente
Please check fit of stockings to confirm proper size and follow donning instructions on the back.
Veuillez vérifier si les bas sont bien adaptés à la taille et suivez les instructions au dos pour les enfiler.
Sírvase comprobar el ajuste de las medias para confirmar el tamaño apropiado y siga las instrucciones proporcionadas en la parte posterior.

Contraindications | Contre-indications | Contraindicaciones

Do not use Medline Anti-Embolism Stocking in the presence of dermatitis conditions, gangrene, severe arteriosclerosis, congestive heart failure, pulmonary edema, ischemic vascular disease, open skin lesions, or massive edema of the legs.

Ne portez pas de bas anti-embolie Medline en présence de dermatite, de gangrène, d'artériosclérose aiguë, d'insuffisance cardiaque congestive, d'œdème pulmonaire, de cardiopathie ischémique, de lésions ouvertes et d'œdèmes importants sur les jambes.

No use las medias antiembolia Medline si presenta condiciones de dermatitis, gangrena, arteriosclerosis severa, fallo cardíaco congestivo, edema pulmonar, enfermedad cardiovascular isquémica, lesiones de piel abiertas, o edema masivo de las piernas.

Washing Instructions | Consignes de lavage | Instrucciones de lavado

Stockings may be machine washed with warm water on the gentle cycle. A hosiery bag recommended. Dry on low heat settings. Do not iron, bleach, or dry clean product.

Les bas peuvent être lavés à la machine avec le cycle linge délicat et de l'eau chaude. Il est recommandé de les mettre dans un sac de bonneterie et de les sécher avec le réglage de chaleur le plus faible. Ne pas les repasser, ne pas utiliser d'eau de javel ou les faire nettoyer à sec.

Las medias pueden lavarse en lavadora con agua tibia en ciclo delicado. Se recomienda utilizar una bolsa para medias. Secar a bajo calor. No planchar, no blanquear, ni lavar en seco el producto.

www.medline.com ©2024 Medline Industries, LP

Medline is a registered trademark of/Medline est une marque déposée de/Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.

Made in China for/Fabriqu  en Chine pour/Fabricado en China para: Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA. **1-800-MEDLINE** V3 RE24VMG

Instructions for Donning | Instructions pour la mise en place Instrucciones para ponerse


Knee-High | Genou | Hasta la rodilla

1



Reach into stocking. Grasp heel pocket and pull stocking inside out until heel is at top of opening. | Passez la main dans la chaussette. Attrapez la partie du talon et tirez l'intérieur de la chaussette vers l'extérieur jusqu'à ce que le talon soit en haut de l'ouverture. | Alcance la media. Tome la cavidad del talón e invierte la media hasta que el talón esté en la parte superior de la abertura.

2

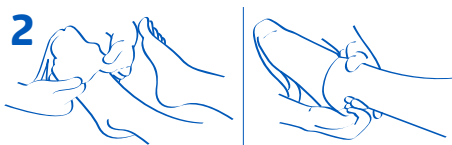

Place stocking onto foot. Stretching sideways, work stocking over foot until heel pocket is positioned over heel. | Mettez la chaussette sur le pied. Étirez de chaque côté pour recouvrir le pied jusqu'à ce que le talon de la chaussette soit sur le talon. | Coloque la media en el pie. Estirando a los lados, ajuste la media sobre el pie hasta que la cavidad del talón esté colocada sobre el talón.

3




Gather loose material at toe and slide over heel. Walk stocking up leg with a slight up and down rocking motion. | Détendez le tissu au niveau des orteils pour le faire glisser sur le talon. Montez la chaussette sur la jambe en la tirant par petit mouvement de haut en bas. | Recoger el material suelto en el dedo del pie y deslizarlo sobre el talón. Conduzca la media hacia arriba de la pierna con un leve movimiento oscilante de arriba a abajo.

4



Distribute fabric evenly. Smooth out any rolls or overlaps. Ensure stocking is 1"-2" below knee. | Étirez régulièrement le tissu. Faites disparaître les plis. Assurez-vous que la chaussette est à 1-2 pouces sous le genou. | Distribuya uniformemente la tela. Alise cualquier doblez o solapamiento. Cerciórese de que la media esté 1"-2" por debajo de la rodilla.

5

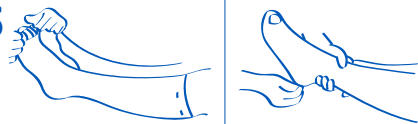

Adjust stocking at toes by gently pulling inspection window. Check and adjust heel position. | Ajustez la chaussette sur les orteils en utilisant l'ouverture de contrôle. Vérifiez et réglez la position du talon. | Ajuste la media en los dedos del pie tirando suavemente de la abertura de inspección. Verifique y ajuste la posición del talón.

Thigh-High | Mi-cuisse | Hasta el muslo

1-5



Follow Steps 1-3 Until Stocking is Just Below the Knee. Straighten leg. Walk remaining portion of stocking over thigh. Bend leg slightly and position top of garment 1"-3" below gluteal fold. Adjust toes and heel as in step 5 under Knee-High. | Suivez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que le bas soit sous le genou. Allongez la jambe. Montez le reste du bas sur la cuisse. Pliez légèrement la jambe et placez le haut du bas à 1-3 pouces sous le pli fessier. Ajustez les orteils et le talon comme indiqué à l'étape 5, dans la section sur les mi-bas. | Siga los pasos 1 a 3 hasta que la media esté justo debajo de la rodilla. Enderece la pierna. Conduzca la porción restante de la media sobre el muslo. Doble ligeramente la pierna y coloque la parte superior de la prenda 1"-3" por debajo del pliegue del glúteo. Ajuste los dedos y el talón según se explica en el paso 5 de las instrucciones de las medias hasta la rodilla.