

Folding Cane

drive
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

With Silicone Grip Handle

Baston Plegable

Puno Silicona

Canne Pliante

Avec Prise de Silicone



***Glow in the
Dark Handle***

***Agarradera que
Brilla en la Oscuridad***

***Poignée qui Brille
Dans le Noir***

**NEW &
IMPROVED
SOFTER GEL GRIP**

**NUEVA AGARRADERA
DE GEL MÁS SUAVE Y
MEJORADA**

**NOUVELLE PRISE
EN GEL
AMÉLIORÉE**

PROPER CANE HEIGHT

For a more comfortable fit, ensure shoe height is the same as shoe style worn most frequently when using cane.

1. Stand as upright as possible on a firm, flat surface and let your arm hang down naturally by your side.
2. Adjust cane so top portion of handle touches inside of wrist where it meets palm.

ADJUSTABLE IN 1" INCREMENTS FROM 32" TO 37"
WEIGHT CAPACITY: 300 LBS.

ALTURA ADECUADA DEL BASTÓN

Para un ajuste más cómodo, asegúrese que la altura de su zapato es aproximadamente la misma del tipo de zapato que usa normalmente al usar el bastón.

1. Párese derecho sobre una superficie firme y nivelada, deje que su brazo descanse a su costado naturalmente.
2. Ajuste el bastón de tal manera que la parte superior de la agarradera toque la parte interna de su muñeca en la parte donde se une a la palma de la mano.

AJUSTABLE CON INCREMENTOS DE 2,5CM DESDE 81 A 94 CM
CAPACIDAD 136KG (300 LBS.) DE PESO

HAUTEUR APPROPRIÉE DE LA CANNE

Pour garantir un confort prolongé, assurez-vous de porter, au moment de déterminer la hauteur de la canne, des chaussures dont la hauteur et le style correspondent à ce que vous porterez le plus fréquemment lorsque vous utiliserez la canne.

1. Tenez-vous debout, aussi droit que possible, sur une surface plane, et laissez votre bras pendre naturellement sur le côté du corps.
2. Ajustez la canne de manière à ce que la poignée touche l'intérieur du poignet, à l'endroit où il rejoint la paume de la main.

AJUSTABLE PAR INTERVALLES DE 1" DE 32" À 37"
CAPACITÉ DE POIDS DE 136KG (300 LBS.)