

NYLON OXYGEN TANK HOLDER

WHEELCHAIR ACCESSORIES

PORTE-BOUTEILLE D'OXYGÈNE EN NYLON

ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT



- Economical alternative to steel tank holders
- Made of easy-to-clean, heavy-duty nylon
- Attaches with easy-to-adjust quick-release buckles
- Fits size E tanks
- Solution de rechange économique aux porte-bouteilles en acier
- Fait de nylon robuste facile à nettoyer
- Se fixe avec des boucles à dégageant rapide à réglage facile
- Convient aux bouteilles de taille E



APPLICATION INSTRUCTIONS:

1. Place the oxygen cylinder in the sleeve.
2. With the cylinder facing away from the backrest, hang the top straps on the push-handles and secure the bottom straps to the wheelchair frame.
3. To secure and position the oxygen tank holder, tighten all four straps as desired.

MODEL/MODÈLE WCA6100
Actual Dimensions/
Dimensions réelles : 27¼" L x 7½" W

MONITORING & INSPECTION:

Inspect before each use: check for broken stitches or parts; torn, cut or frayed material; or buckles that do not hold securely. **DO NOT** use soiled or damaged products.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Wipe clean with mild detergent. OSHA approved intermediate level disinfectants can be used per manufacturer instructions. **DO NOT** use phenol and benzyl based disinfectants.
- After cleaning, products **MUST** be rinsed with water to remove any residual chemicals.
- Make sure products are completely dry before use.

MODE D'INSTALLATION :

1. Placez la bouteille d'oxygène dans le manchon.
2. En orientant la bouteille dans le sens contraire du dossier, installez les courroies supérieures sur les poignées de poussée et les courroies inférieures sur le cadre du fauteuil roulant.
3. Pour fixer et positionner le porte-bouteille d'oxygène, serrez les quatre courroies à volonté.

SURVEILLANCE ET INSPECTION :

Vérifiez avant chaque utilisation si des pièces sont brisées ou décousues, si du matériel est déchiré, coupé ou effiloché, ou si des boucles ne sont pas assez solides. **N'utilisez PAS** de produits souillés ou endommagés.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

- Nettoyez le porte-bouteille avec un chiffon et un détergent doux. Des désinfectants de puissance intermédiaire approuvés par la OSHA peuvent être utilisés selon les instructions du fabricant. **N'utilisez PAS** de désinfectants à base de phénol et de benzyle.
- Après le nettoyage, les produits **DOIVENT** être rincés à l'eau pour en éliminer tous les résidus chimiques.
- Assurez-vous que les produits sont complètement secs avant de les utiliser.

www.medline.com

Manufactured in China for/Fabriqué en Chine pour : Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
1-800-MEDLINE V1 RE23TKH